

# 사용설명서

수입업자 : 프로메디칼

업허가 번호 : 제 1396호

품목신고번호 : 수신 21-2083호

모델명 : SZ5 외 2건

사용목적 : 치과용 치석제거기에 사용하는 팁

**본 제품은 의료기기 임.**

## 사용방법

### 1. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 제품의 멸균상태 및 외관상 현저한 변형이나 이물질 부착, 청결상태 등을 확인한다.
- 2) 호환하여 사용되는 초음파치석제거기를 준비한다.

### 2. 조작방법

- 1) 환자의 치석형태를 파악하여 적합한 사이즈 및 현상의 스켈러팁을 선택한다.
- 2) 스켈러팁 아래 체결부위와 초음파치석제거기를 체결한 후 진동이 오면 알맞게 세기를 조절한다.
- 3) 치석이 있는 부위에 살살 긁어내듯이 사용한다.

### 3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- 1) 사용 후 반드시 흐르는 수돗물에 세척하고, 스팀멸균(온도 121℃, 15분 이상)한 후에, 스켈러팁 거치대에 거치하여 실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.

## 사용시 주의사항

### 1. 일반적 주의

- 1) 제품외관상 문제가 있는 것은 사용하지 않는다.

### 2. 적용상의 주의

- 1) 치과치료 이외의 용도로 사용하지 말 것.
- 2) 진동을 이용하여 사용하는 제품으로, 한 부위에 장시간 사용하지 않는다.

### 3. 보관방법

- 1) 사용 후 반드시 흐르는 수돗물에 세척하고, 스팀멸균(온도 121℃, 15분 이상)하여 사용하고, 상온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.

※ 부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

작성연월 2024.12