

사용설명서

수입업자 : 프로메디칼

업허가 번호 : 제 1396호

품목신고번호 : 수신 20-1790호

모델명 : Dentiann Rubber Dam Punch

사용목적 : 치과용고무방습기에 구멍을 뚫는 데 사용되는 기구

본 제품은 의료기기 임.

사용방법

1. 사용 전 준비사항

1) 제품의 외관상 현저한 변형이나 이물질 부착, 청결상태 등을 확인하고, 시범작동하여 이상유무를 판단한다.

2. 사용방법 및 조작순서

1) 진료에 요구되는 홀 사이즈를 디스크를 조정하게 세팅한다.
2) 치과용고무방습기(러버댐) 표면의 원하는 위치에 제품을 위치하여, 핸들을 조작하여 펀칭한다.

3. 사용 후 조치사항

1) 제품을 흐르는 수돗물에 부드러운 솔로 이물질이 남지 않도록 세척 한 뒤, 오토클레이브(고압증기멸균기)를 이용하여 멸균(121℃, 20~30분)하여 사용하고, 실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.

사용시 주의사항

1. 일반적 주의사항

1) 숙련된 시술자에 의하여 사용되어야 한다.
2) 핀 부분은 미세하고 날카로우므로 손상이 없도록 조심한다.
3) 본 시술기구는 규정하는 용도 외에 사용되어서는 안된다.

※ 부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

작성연월 2024.12