

Dentaclean 사용 설명서

인상/덴처 소독제 Impression and denture disinfectant REF 520 0100 6 인상제 (실리콘, 알지네이트, 하이드로콜로이드, 폴리에테르)와 덴처 소독제 농축액 Aldehyde-, alcohol-, phenol- free 곰팡이균, 박테리아, 바이러스에 대한 살균작용 (HBV,HIV) 혼합액 만드는 법 : 본 원액을 물과 함께 1 : 9 로 섞는다. 적용 방법 : 혼합액을 비닐이나 유리 용기에 담는다. 흐르는 물에 소독하려는 재료를 잠깐 헹궈내고 혼합액에 넣는다. 오염이 심한 덴처는 덴처 세척제(REF 520 0099 2)를 이용해 사전에 세척을 한 후 용액에 넣는다. 1분 있다 꺼낸 후, 흐르는 물에 다시 헹군다. 필요하다면 에어로 드라이 시켜도 무방하다. 참조 : 인상/덴처 소독제는 다른 세척제나 소독제와 섞어서는 안 된다. 이 소독제의 사용 횟수는 세척하는 정도에 따라 달라지나 확실한 효과를 위해 용액을 자주 교환해 줄 것을 권장한다. 폐기 : 사용했던 용액은 싱크대를 통해 폐기해도 된다.	퍼미스 소독제 Pumice Disinfectant REF 520 0099 9 퍼미스 슬러리와 같이 사용하는 혼합 소독제 곰팡이균, 박테리아, 바이러스에 대한 살균작용 적용 방법 : 퍼미스 슬러리를 이 혼합액만을 사용하여 원하는 농도로 섞는다. 섞인 퍼미스 슬러리는 이 농도를 유지하며 2-3주간 사용 가능하다. 이 기간 동안에 살균 작용은 지속된다. 추가적으로 퍼미스 슬러리나 소독제 사용이 가능하다. 최대 3주 후에는 완전히 새로운 퍼미스 슬러리로 교체해야 한다. 기존의 방법에 따라 연마하고 씻어낸다. 소독제는 항상 밀봉되어야 있어야 하며 사용 전 흔들어 준다. 폐기 : 사용된 퍼미스 슬러리는 가정용이나 산업용 폐기물과 함께 폐기되어야 한다. 남은 용액은 하수로 흘러 보낼 수 있다.
덴처 세척제 Denture cleaner REF 520 0099 2 치태, 치석, 침착물 제거를 위한 덴처 세척제 농축액 주의 : 항상 보호 안경을 착용한다! 혼합액 만드는 법 : 용액을 물과 함께 1 : 10으로 섞어 유리나 내산성있는 플라스틱 용기에 넣는다. 덴처 세척제는 산성이므로, 용기에 물을 먼저 넣고 농축액을 붓는다. 이 때 농축액이 위험하므로 절대 튀지 않게 조심해서 붓는다. 적용 방법 : 혼합액을 유리용기에 넣고 50-70℃으로 데운 후, 초음파 세척기에 넣는다. 오염된 덴처를 흐르는 물에 간단히 헹군 후, 플라스틱 집게를 사용해 혼합 용액에 넣고, 10-15분간 초음파 세척을 한다. 집게를 사용해 건져낸 다음, 흐르는 물에 씻고 남아있는 잔여물은 브러쉬를 이용해 제거해 낸다. 보관 방법 : 덴처 세척제 (농축액과 혼합 용액)은 꼭 밀봉이 된 상태로, 내산성 있는 용기에 보관한다. 폐기 : 농축액과 사용된 혼합액은 특별한 폐기를 요한다. 사용 된 혼합액은 많은 양의 흐르는 물과 함께 흘러 보낸다.	석고 제거액-속성 Speed Plaster solvent REF 520 0101 0 석고 잔여물을 제거하는 혼합액. 물과 1:1이나 최대 1:2로 섞어서 사용 주의 : 보호 안경을 꼭 착용할 것! 사용 방법 : 혼합액을 온도 저항이 강한 비닐이나 유리용기에 넣고, 제거하고자 하는 보철물을 석고가 제거될 때까지 담궈 놓는다. 살짝 액을 데우거나 초음파 세척기에 넣고 세척을 하면 제거시간이 줄어든다. 알루미늄으로 만들어진 재료에는 효과가 없다. 작업 공간은 환기가 잘 되는 곳 이여야 한다! 보관 방법 : 0-25℃에서 보관 폐기 : 제거 기능이 저하하면 사용했던 혼합액을 많은 양의 물과 함께 흘러 버린다.