

- **제품명** | 큐스캔 플러스(Qscan Plus)
- **제조사** | (주)아이오바이오 (aiobio)
- **판매원** | (주)아이오바이오 (aiobio)
- **제조사 주소** | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 555 선일테크노피아 306호
- **품목허가(신고)번호** | 제신 17-528 호
- **사용목적** | 치과수술 또는 검사시 구강을 집중적으로 조명하는 기구
- **포장단위** | 1set
- **성능 및 사용방법** | 사용설명서 참조
- **사용시 주의사항** | 사용설명서 참조
- **보관방법** | 직사광선을 피하고 상온에서 보관합니다.
- **본 첨부문서**는 2017년 05월에 제작된 것입니다.
- **본 제품**은 의료기기입니다.

### 제품보증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 보증서를 가지고 판매점에 수리를 의뢰해 주십시오.
3. 보증기간 내 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하여 수리를 의뢰할 경우는 무상수리해 드립니다.

|      |            |            |   |
|------|------------|------------|---|
| 제품명  |            |            |   |
| 구입일  | 년          | 월          | 일 |
| 구입처  |            |            |   |
| 모델명  | Qscan plus |            |   |
| 보증기간 | 제품         | 구입일로부터 1년  |   |
|      | 배터리        | 구입일로부터 6개월 |   |
| 판매자  |            |            |   |

#### 유료 서비스 안내

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. 사용자의 잘못, 취급 부주의로 인한 사고(침수, 충격, 낙하, 파손 등) | 4. 정품 이외의 부속품 사용에 의한 고장 |
| 2. 개조로 인한 고장                                | 5. 천재지변에 의한 고장          |
| 3. 당사자가 아닌 제 3자의 수리로 인한 고장                  | (화재, 지진, 수해 등)          |

본 사용설명서의 모든 저작권은 (주)아이오바이오에 있으며 이를 무단으로 복제, 배포할 수 없습니다.  
이를 어길 경우에는 민사상 손해 배상 및 형사처벌의 대상이 됩니다.

Qscan plus™

AIOBIO  
아이오바이오

아이오바이오 AIOBIO Co.,Ltd.

Tel \_ 02-561-5101 Fax \_ 02-3454-1403

Hp \_ www.aiobio.co.kr

E-mail \_ aiobio@aiobio.co.kr

Qscan plus™

큐스캔 플러스

제품설명서

AIOBIO  
아이오바이오

## 큐스캔 플러스 소개

### 1. 큐스캔 플러스란?

큐스캔 플러스는 치과병의원 및 가정에서 구강을 집중적으로 조명하는 기구입니다.

### 2. 제품 구성

#### 구성품

본체, 후드, 5핀 충전 케이블



## 동작 설명

- 동작 버튼을 누를 때마다 기기의 LED가 ON/OFF 됩니다.
- 버튼을 off하지 않으면 20초후에 자동으로 전원이 꺼집니다.



## 충전 방법

기기의 하단에 있는 충전 단자에 5핀 충전케이블을 꽂고 반대편 USB 단자를 전원 공급이 가능한 PC나 아답터에 연결합니다.



## 사용시 주의 사항

- 01 반드시 지정된 전용 5핀 충전 케이블을 사용합니다.
- 02 전용 배터리 외에는 사용을 금합니다.
- 03 완전 방전은 피하십시오.(배터리 수명이 짧아집니다.)
- 04 임의로 분해하지 마십시오.
- 05 구강 조명기만으로 사용하지 않습니다.
- 06 속련된 자 이외에는 사용을 금합니다.
- 07 LED광원을 눈으로 직접 보지 않습니다.
- 08 백내장이나 망막 등의 장애가 있는 환자에게 사용할 때에는 안과 전문의와 상담 후 사용합니다.
- 09 외부 불빛을 최소화 한 후 사용합니다.
- 10 사용하기 전 외관상 구조나 조작 이상 유무를 확인합니다.
- 11 기기를 무리하게 비틀거나 충격을 주어서는 안됩니다.
- 12 고장이나 이상이 발견되었을 때는 즉시 사용을 중지하고 제조원의 수리자에게 연락합니다.
- 13 물이나 습도가 높은 곳에서 사용하지 않습니다.
- 14 사용 후 안전한 곳에 보관합니다.
- 15 기기를 떨어뜨리지 않도록 주의합니다.
- 16 직사광선을 피하고 실온 보관합니다.

## 기능 설명

LED 4개를 조사하여 구강 내를 확인



## 사용 설명

- 처음 사용시 배터리가 충전되어 있지 않을 수 있습니다. (완충 후 사용하십시오.)
- 구성품이 모두 포함되어있는지 확인하십시오.
- 본체 작동 유무를 확인하십시오.

### 사용방법 및 조작순서

1. 대상자의 구강을 향해서 LED가 조명할 수 있도록 위치를 잡습니다.
2. 기기의 전원을 켭니다.
3. 필터를 통해 대상자의 구강을 확인합니다.
4. 기기의 전원을 끕니다.



※ 자가 확인 시에는 거울을 통해 구강을 확인합니다.

## 제품 사양

- \* **본체**    사이즈 : 149.34 \* 61.6 mm, 무게 : 115.23g  
          LED : 405nm 4ea LED
- \* **배터리**   전압 : 3.7V, 용량 : 780 mAh, 무게 : 14.95 g